

Protocolo de uso de la solución Hexafluorine®

En caso de contacto con ácido fluorhídrico y derivados fluorados en medio ácido*.

INTERVENCIÓN EN EL PRIMER MINUTO



Para lavar un ojo



Usar un
LPM
500 ml

- En cualquier caso, un lavado debe ser seguido de un reconocimiento médico.
- Conforme al protocolo médico de la empresa, aplicar luego un antídoto local específico, tipo gluconato cálcico.
- En el caso de una atención retardada, este acto médico es aún más importante debido al riesgo sistémico inherente a este tipo de salpicadura.

**Eficacia limitada sobre las bases. Preferir el uso de la solución Diphotérine®*

TELÉFONOS EN CASO DE URGENCIA 112		
Servicio de Prevención	918856525 918856515	Interno 6525-6515
Centro Toxicológico Nacional	915620420	Interno 3104

PROTOCOLO DE LAVADO CON LA SOLUCIÓN HEXAFLUORINE®

Comenzar el lavado en el minuto consecutivo al contacto, empezando por las zonas destapadas.

Quitar la ropa y/o quitar las lentillas oculares.

Continuar rápidamente el lavado sobre las zonas descubiertas. No volver a ponerse las prendas manchadas por el lavado o el producto químico.

Consultar a un especialista.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL LAVADO

Nunca retrasar un lavado.

De manera óptima, usar la solución Hexafluorine® en primera intención.

Usar la totalidad del envase.

A falta de solución Hexafluorine®, usar agua y lavar lo más rápidamente posible con solución Hexafluorine®.

En caso de empezar el lavado después del primer minuto, seguir lavando la superficie afectada durante 3 a 5 veces el tiempo de contacto. No es útil seguir lavando durante más de 15 minutos en caso de un lavado ocular retardado.

Conforme al protocolo médico de la empresa, aplicar luego un antídoto local específico, tipo gluconato cálcico.

Luego, consultar urgentemente a un médico.

El uso de la solución AfterwashII® o suero fisiológico después de un lavado activo del ojo se recomienda para obtener una vuelta más rápida del ojo a un estado fisiológico.

Si las mucosas bucales han sido afectadas por la salpicadura, enjuagar la boca con la solución Hexafluorine® y escupir.

Si el conducto auditivo ha sido afectado, lavar rápidamente con la solución Hexafluorine®, instilando 500 ml en el conducto, cabeza inclinada sobre el lado para permitir la evacuación del líquido fuera del oído.

Al igual que durante cualquier lavado ótico unilateral con un líquido a temperatura ambiente,

una sensación vertiginosa, sin ninguna gravedad, puede producirse.

Disminuye de manera espontánea en algunos minutos.

ENVASE	TIEMPO MEDIO DE DIFUSIÓN
LPM (500 ML)	3 MINUTOS

**Eficacia limitada sobre las bases. Preferir el uso de la solución Diphotérine®.*

TELÉFONOS EN CASO DE URGENCIA 112

Servicio de Prevención	918856525 918856515	Interno 6525-6515
Centro Toxicológico Nacional	915620420	Interno 3104